

## BRUKSANVISNING

### Revaxör® Olja öronspray som förebygger vaxpropp i örat

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Revaxör Olja är en vårdande olja, som förebygger uppkomst av vaxpropp i örat. Revaxör Olja fuktar också huden i hörselgången och minskar därigenom klåda och irritation orsakade av torr hud.

#### ANVÄND INTE REVAXÖR® OLJA

- vid öroninflammation eller ont i örat,
- vid flytningar från örat,
- vid trumhinneskada, sprucken eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan),
- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen i Revaxör Olja.

#### SÄRSKILDA ANVÄNDARGRUPPER

Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer, be någon annan dosera Revaxör Olja i din hörselgång.

**Barn:** Revaxör Olja ska inte användas på barn under ett år utan kontakt med läkare.

**Användare av hörapparat:** Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter Revaxör Olja har absorberats, dvs. tills örat känns torrt.

#### MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Revaxör Olja har inga kända biverkningar.

Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Revaxör Olja har gett dig biverkningar.

#### DOSERINGSANVISNINGAR

**För att förebygga vaxpropp i örat:** Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgångarna en gång i veckan. Regelbunden användning av Revaxör Olja förhindrar uppkomst av vaxpropp. Revaxör Olja kan användas så länge det behövs.

**Behandling av torrhet och klåda i hörselgången:** Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgångarna en gång i veckan eller vid behov. Revaxör Olja kan användas så länge det behövs.

#### ANVÄNDNING AV ÖRONSPRAYEN

1. Värm flaskan med Revaxör Olja i handen i några minuter så att innehållet får kroppstemperatur (cirka 37 °C).
2. Före den **första användningen** spraya t.ex. i en näsduk eller i annat papper 3–5 gånger så att en jämn dusch erhålls. Om sprayflaskan inte använts på ett tag, är det bra att kontrollera att sprayen är jämn genom att spraya 1–2 provsprayningar.
3. Dra försiktigt den övre delen av ytterörat bakåt och uppåt. Håll flaskan upprätt med spraymunstycket placerat vid hörselgångens mynning. Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgången. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse ett par gånger.
4. Torka av extra olja i ytteröra t.ex. med en näsduk. Använd inte bomullspinnar! Oljan som sprayats i hörselgången ska inte sköljas bort.
5. Lösgör spraymunstycket efter användningen, rengör det med en mild tvällösning, skölj omsorgsfullt, torka och sätt tillbaka på flaskan. **Sprayflaskan ska aldrig användas utan att spraymunstycket är på sin plats!**

## **ÖVRIGT ATT OBSERVERA**

Revaxör Olja är avsedd för personligt bruk.

Revaxör Olja är endast avsett för lokalt bruk i hörselgången.

Om du använder Revaxör Olja på ordination av läkare, följ noggrant de anvisningarna du får av läkaren.

Om du har frågor angående användningen av Revaxör Olja, kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket.

## **INNEHÅLL**

Triglycerider, medellångkedjiga, isopropylpalmitat, hydrerad polydecen.

## **FÖRVARING**

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.

Öppnad flaskan ska användas inom 6 månader.

## **FÖRPACKNINGAR**

Revaxör Olja 15 ml

## **TILLVERKARE**

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

## **REPRESENTANT I SVERIGE**

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com

## **DENNA BRUKSANVISNING ÄNDRADES SENAST**

2018-12-28

