

BRUKSANVISNING
Revaxör®
örondroppar

Användningsområden

Revaxör örondroppar löser upp vaxproppar i örat.

Använd inte Revaxör örondroppar

- vid öroninflammation eller ont i örat
- vid flytningar från örat
- vid trumhinneskada, perforerad eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan)
- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen i Revaxör örondroppar.

Särskilda användargrupper

Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer, be någon annan droppa Revaxör örondroppar i din hörselgång och skölja ditt öra enligt de här anvisningarna.

Barn

Revaxör örondroppar används för barn endast enligt läkares bedömning. Följ noggrant anvisningarna du får. Öronsköljning hos barn ska helst göras på läkarens eller hälsovårdarens mottagning.

Användare av hörapparat

Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter öronsköljningen och när vattnet har runnit ut ur örat.

Möjliga biverkningar

I sällsynta fall har lokala allergiska reaktioner förekommit vid användning av Revaxör örondroppar. Obehaglig känsla i hörselgången, hudirritation och övergående svindel kan även förekomma. Tinnitus kan vara ett symtom av vaxpropp och övergående tinnitus kan förekomma efter rengöring av örat.

Om sköljblåsan trycks djupt in i hörselgången kan trumhinnan skadas.

Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Revaxör örondroppar har gett dig biverkningar.

Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och tillsynsmyndigheten (Läkemedelsverket, telefon: 018-174600). Detta är viktigt för den löpande övervakningen av nytta/ riskbalansen för produkten.

Användning av Revaxör örondroppar och sköljblåsa

Så här använder du örondroppar för att lösa upp vaxproppar

- Värm Revaxör örondroppar flaskan i handen i några minuter så att innehållet får kroppstemperatur (cirka 37°C).
- Luta huvudet åt sidan eller lägg dig med huvudet på sidan och droppa omkring 10–20 droppar Revaxör örondroppar i örat. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse ett par gånger. Örat kan täppas till med en liten bomullstuss fuktad med några droppar Revaxör örondroppar.
- Låt Revaxör örondroppar verka i 20–60 minuter. Vid behov kan lösningen lämnas att verka över natten.

Efter användning av Revaxör örondroppar måste hörselgången sköljas. Du kan gå till läkaren eller hälsovårdaren för öronsköljning eller använda Revaxör sköljblåsa. Öronsköljning på mottagning är särskilt rekommenderat när det är fråga om ett barn.

Så här sköljer du ur örat med sköljblåsan

- Sköljblåsan ska sköljas ur inför varje använding.
- Dra upp handvarmt vatten i sköljblåsan.
- För försiktigt in sköljblåsans spets några millimeter i hörselgången och skölj örat med ett lätt och lugnt tryck på sköljblåsan.

Blåsans spets ska inte tryckas djupt in i hörselgången!

- Upprepa sköljningen ett par gånger, tills sköljvattnet är helt rent.
- Skölj ur sköljblåsan och töm den ordentligt efter varje använding. Låt vattnet droppa ur med spetsen vänd nedåt.

Om vaxproppen inte löses, kan behandlingen med örondroppar och öronsköljning upprepas vid behov tre dagar i följd.

Obs! Skölj ur hörselgången med sköljblåsan efter varje behandling.

Om öronsköljningen görs på läkarens eller hälsovårdarens mottagning, följ deras anvisningar.

Det får aldrig göra ont vid sköljningen. I sådana fall, sluta öronsköljning och kontakta en läkare.



Undvik kontakt med ögonen. Vid behov, skölj ögonen rikligt med vatten och kontakta läkare.

Om du har frågor angående användningen av Revaxör örondroppar bör du kontakta läkaren, hälsovårdaren eller apoteket.

Innehåll

Allantoin (3 mg/ml), etoxylerat lanolin, polysorbat 80, polysorbat 60, flytande sorbitol, fruktossirap, polyoxyetenstearyleter, polyoxyetenoleyleter, lanolinolja, isopropylmyristat, riskliolja, fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroxitoluen, sorbinsyra, bensetonklorid och vatten.

Sköljblåsan: Polyvinylklorid (PVC)

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara Revaxör örondroppar och sköljblåsan utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.

Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överbliven produkt lämnas in på apotek för kassering. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningar

Revaxör örondroppar 10 ml

Vårdset: Revaxör örondroppar 10 ml med sköljblåsa

Tillverkare

Revaxör örondroppar:

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Sköljblåsa:

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Tyskland

Tillverkare av vårdset

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Distributör i Sverige

Orion Pharma AB

Besöksadress

Golfvägen 2, 4 tr
SE-182 31 Danderyd
Sverige

Postadress

Box 85,
SE-182 11 Danderyd
Sverige

Tel. +46 8 623 64 40
www.orionpharma.se

Denna bruksanvisning ändrades senast 2025-04



Medicinteknisk produkt



Läs bruksanvisningen



Varningssymbol



Tillverkare



Tillverkningsland



Distributör



Översättning



Övre temperaturgräns



Använd senast



Tillverkningssats



Unik produktidentifiering