

BRUKSANVISNING
Revaxör® Olja öronspray

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Revaxör Olja öronspray är en vårdande öronolja, som ska doseras i den yttre hörselgången. Oljan är avsedd för att förebygga uppkomsten av vaxproppar, återfukta huden i hörselgången och minska den klåda och irritation som torr hud i hörselgången kan orsaka.

ANVÄND INTE REVAXÖR® OLJA

- vid öroninflammation eller ont i örat
- vid flytningar från örat
- vid trumhinneskada, sprucken eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan)
- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen i Revaxör Olja.

SÄRSKILDA ANVÄNDARGRUPPER

Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer, be någon annan dosera Revaxör Olja i din hörselgång.

Barn: Revaxör Olja ska inte användas på barn under ett år utan kontakt med läkare.

Användare av hörapparat: Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter Revaxör Olja har absorberats, dvs. tills örat känns torrt.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Revaxör Olja öronspray har inga kända biverkningar. Användningen av öronsprayer, såsom Revaxör Olja, kan ändå orsaka obehagskänslor i örat, som exempelvis smärta. Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Revaxör Olja har gett dig biverkningar. Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och tillsynsmyndigheten (Läkemedelsverket, telefon: 018-174600). Detta är viktigt för den löpande övervakningen av nytta/riskbalansen för produkten.

DOSERINGSANVISNINGAR

För att förebygga vaxpropp i örat:

Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgångarna en gång i veckan. Regelbunden användning av Revaxör Olja öronspray förhindrar uppkomst av vaxpropp. Revaxör Olja kan användas så länge det behövs.

Behandling av torrhet och klåda i hörselgången: Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgångarna en gång i veckan eller vid behov. Revaxör Olja kan användas så länge det behövs.

ANVÄNDNING AV ÖRONSPRAYEN

1. Värm flaskan med Revaxör Olja i handen i några minuter så att innehållet får kroppstemperatur (cirka 37°C).
2. **Före den första användningen** spraya i luften eller t.ex. i en näsduk eller i annat papper 3–5 gånger så att en jämn dusch erhålls. Rikta sprayen bort från dig. Om sprayflaskan inte använts på ett tag, är det bra att kontrollera att sprayen är jämn genom att spraya 1–2 provsprayningar.
3. Dra försiktigt den övre delen av ytterörat bakåt och uppåt. Håll flaskan upprätt med spraymunstycket placerat vid hörselgångens mynning. Spraya 1–2 doser av Revaxör Olja öronspray i hörselgången. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse ett par gånger.
4. Torka av extra olja i ytteröra t.ex. med en näsduk. Använd inte bomullspinnar! Oljan som sprayats i hörselgången ska inte sköljas bort.
5. Lösgör spraymunstycket efter användningen, rengör det med en mild tvållösning, skölj omsorgsfullt, torka och sätt tillbaka på flaskan. **Sprayflaskan ska aldrig användas utan att spraymunstycket är på sin plats!**

ÖVRIGT ATT OBSERVERA

Revaxör Olja öronspray är avsedd för personligt bruk.
Revaxör Olja är endast avsett för lokalt bruk i hörselgången.
Om du använder Revaxör Olja på ordination av läkare, följ noggrant de anvisningarna du får av läkaren.
Om du har frågor angående användningen av Revaxör Olja, kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket.

INNEHÅLL

Triglycerider, medellångkedjiga (0,40 mg/ml), isopropylpalmitat (0,35 mg/ml), hydrerad polydecen (0,25 mg/ml)

FÖRVARING

Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.
Öppnad flaskan ska användas inom 6 månader.
Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överbliven produkt lämnas in på apotek för kassering. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

FÖRPACKNINGAR

Revaxör Olja 15 ml

TILLVERKARE

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Orion Pharma AB

Besöksadress

Golfvägen 2, 4 tr
SE-182 31 Danderyd
Sverige

Postadress

Box 85,
SE-182 11 Danderyd
Sverige
Tel. +46 8 623 64 40
www.orionpharma.se

DENNA BRUKSANVISNING ÄNDRADES
SENAST
06/2024



Medicinteknisk produkt



Tillverkare




Läs bruksanvisningen



Tillverkningssats



Använd senast

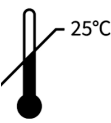

Övre temperaturgräns



Varningssymbol



Unik produktidentifiering



Tillverkningsland



Distributör



Översättning