

BRUKSANVISNING

Revaxör®  
öronspray

**Användningsområden**  
Revaxör öronspray löser upp vaxproppar i örat.

- Använd inte Revaxör öronspray**
- vid öroninflammation eller ont i örat
  - vid flytningar från örat
  - vid trumhinneskada, perforerad eller punkterad trumhinna (t. ex. rör inopererat i trumhinnan)
  - om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen i Revaxör öronspray.

**Särskilda användargrupper**  
Om du har koordinationssvårigheter, rörelsesvårigheter eller darrande händer be någon annan dosera Revaxör öronspray i din hörselgång och skölja ditt öra enligt de här anvisningarna.

**Barn**  
Revaxör öronspray används till barn endast efter läkares bedömning. Följ noggrant anvisningarna du får. Öronsköljning hos barn ska helst göras hos läkare eller vårdcentral.

**Användare av hörapparat:**  
Om du använder hörapparat, sätt den på plats först efter öronsköljningen och när vattnet har runnit ut ur örat.

**Möjliga biverkningar**  
I sällsynta fall har lokala allergiska reaktioner förekommit vid användning av Revaxör öronspray. Obehaglig känsla i hörselgången, hudirritation och övergående svindel kan även förekomma. Tinnitus kan vara ett symtom av vaxpropp och övergående tinnitus kan förekomma efter rengöring av örat.

Om sköljblåsan trycks djupt in i hörselgången kan trumhinnan skadas.

Kontakta läkare eller apotek om du misstänker att Revaxör öronspray har gett dig biverkningar.

Allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och tillsynsmyndigheten (Läkemedelsverket, telefon: 018-174600). Detta är viktigt för den löpande övervakningen av nytta/riskbalansen för produkten.

**Användning av Revaxör öronspray och sköljblåsan**

Så här använder du öronspray för att lösa upp vaxproppar

- Värm Revaxör öronspray flaskan i handen i några minuter så att innehållet får kroppstemperatur (cirka 37°C).
- **Före den första användningen** spraya i luften eller t.ex. i näsduk 3–5 gånger så att en jämn dusch erhålls. Rikta sprayen bort från dig. Om sprayflaskan inte använts på ett tag, är det bra att kontrollera att sprayen är jämn genom att spraya 1–2 provsprayningar.
- Dra försiktigt den övre delen av ytterörat bakåt och uppåt. Håll flaskan upprätt med spraymunstycket placerad vid hörselgångens mynning. Spraya 2–3 doser av Revaxör öronspray i hörselgången. Dra örsnibben upp och ner försiktigt med en vridande rörelse ett par gånger. Örat kan täppas till med en liten bomullstuss fuktad med Revaxör öronspray.
- Låt Revaxör öronspray verka i 20–60 minuter. Vid behov kan lösningen lämnas att verka över natten.
- Lösgör spraymunstycket efter användning, rengör det med mild tvålösning, skölj omsorgsfullt, torka och sätt tillbaka på flaskan. **Sprayflaskan ska aldrig användas utan att spraymunstycket är på sin plats!**

Efter användning av Revaxör öronspray måste hörselgången sköljas. Du kan gå till läkare eller sjuksköterska för öronsköljning eller använda Revaxör sköljblåsa. I synnerhet när det är fråga om ett barn, rekommenderas att öronsköljningen görs på vårdcentral.

Så här sköljer du örat med sköljblåsan

- **Sköljblåsan ska sköljas ur inför varje användning.**
- Sug upp ljummet vatten i sköljblåsan.
- För försiktigt in sköljblåsans spets några millimeter i hörselgången och skölj örat med ett lätt och lugnt tryck på sköljblåsan.

**Blåsans spets ska inte tryckas djupt in i hörselgången!**

- Upprepa sköljningen ett par gånger, tills sköljvattnet är helt rent.
- Skölj ur sköljblåsan och töm den ordentligt efter varje använding. Låt vattnet droppa ur med spetsen vänd nedåt.

**Övrigt att observera**  
Revaxör öronspray är avsedd för personligt bruk.

Om vaxproppen inte löses upp med en behandling, kan behandlingen med öronspray och öronsköljning upprepas vid behov tre dagar i följd.

**Obs!** Skölj ur hörselgången med sköljblåsan efter varje behandling.

Om öronsköljningen görs av läkare eller sjuksköterska på vårdcentral, följ deras anvisningar.

**Det får aldrig göra ont vid sköljningen. I så fall, avbryt öronsköljning och kontakta en läkare.**

 Undvik kontakt med ögonen. Vid behov, skölj ögonen rikligt med vatten och kontakta läkare.

Om du har frågor angående användningen av Revaxör öronspray bör du kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket.

**Innehåll**  
Allantoin (3 mg/ml), etoxylerat lanolin, polysorbat 80, polysorbat 60, flytande sorbitol, fruktossirap, polyoxyetenstearyleter, polyoxyetenoleyleter, lanolinolja, isopropylmyristat, riskliolja, fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroxitoluen, sorbinsyra, bensetonklorid och vatten.  
Sköljblåsan: Polyvinylklorid (PVC)

**Förvaring**  
Förvaras vid högst 25°C.  
Förvara Revaxör öronspray och sköljblåsan utom syn- och räckhåll för barn.  
Använd inte efter utgångsdatumet på förpackningen.  
Produkten ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överbliven produkt lämnas in på apotek för kassering. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**Förpackningar**  
Revaxör öronspray 10 ml  
Vårdset: Revaxör öronspray 10 ml med sköljblåsa

**Tillverkare**  
Revaxör öronspray:  
Orion Corporation  
Orionvägen 1  
FI-02200 Esbo  
Finland  
Sköljblåsa:  
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG  
Maerkische Strasse 35  
58675 Hemer  
Tyskland

**Tillverkare av vårdset**  
Orion Corporation  
Orionvägen 1  
FI-02200 Esbo  
Finland

**Distributör i Sverige**  
Orion Pharma AB

**Besöksadress**  
Golfvägen 2, 4 tr  
SE-182 31 Danderyd  
Sverige

**Postadress**  
Box 85,  
SE-182 11 Danderyd  
Sverige  
Tel. +46 8 623 64 40  
www.orionpharma.se

**Denna bruksanvisning ändrades senast 2025-04**

 Medicinteknisk produkt

 Läs bruksanvisningen

 Varningssymbol

 Tillverkare

 Tillverkningsland

 Distributör

 Översättning

 25 °C  
Övre temperaturgräns

 Använd senast

 Tillverkningsatts

 Unik produktidentifiering